

Gebruiksaanwijzing CryoSuccess / Cryo Alfa

Belangrijke instructies voor het eerste gebruik van de CryoSuccess

- Leest u deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, voordat u de CryoSuccess pen gaat gebruiken.
- Bekijk de veiligheidsinstructies van de N₂O ampullen.
- Stel de pen niet bloot aan warmte of aan de zon.
- Verander niets aan de pen of aan de veiligheidsvoorschriften.
- Gebruik een zachte doek met een milde desinfectans om de pen te reinigen.
- Bij verwisselen tip deze handvast aandraaien, niet met veel kracht!
- Verwijder de ampul alleen als deze leeg is.

Instructies voor het verwisselen van een ampul

Wanneer er geen N₂O meer vrijkomt, is het ampul leeg. Om technische redenen zal er altijd een kleine hoeveelheid gas achterblijven in de ampul.

Volg altijd deze procedure:

LET OP! Gevaar voor bevriezing bij het afschroeven van de ampul. Draag handschoenen.

Plaats het metalen staafje S in de uitsparing van de CryoSuccess. Houdt de ampul vast en draai de CryoSuccess aan het staafje tegen de klok in los. Schroef de nieuwe ampul op dezelfde manier weer goed vast zonder al te veel kracht te zetten.

Let op: gebruik altijd het metalen staafje en plaats deze goed in de pen. Gebruik niet de bedienings-handel om kracht te zetten voor het los- of vastdraaien van de ampul!

De garantie vervalt als de handel door deze reden verboden is!

Gebruik

Verwijder het bescherm dopje en plaats de tip direct **op de huid**. Voor de juiste behandel tijden zie originele handleiding.

Veiligheidsinstructies

De pen werkt met patronen die onder druk staan. Hierdoor moeten er bepaalde veiligheidsmaatregelen in ogenschouw worden genomen. Gebruik nooit een beschadigde pen. Gevallen exemplaren moeten eerst door de fabrikant nagekeken worden voor ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Bewaar de pen en de patronen buiten bereik van kinderen. Buig niet over de pen heen, terwijl u het patroon verwisselt. Schroef het patroon nooit scheef op de houder! Het schroeven van het patroon moet zonder weerstand plaatsvinden om zo een gelijkmatige uitvoer van het gas te garanderen. Probeer niet zelf de pen te repareren, hierdoor verliest u uw garantie en geeft de fabrikant de aansprakelijkheid op. Gebruik de pen alleen voor de daarvoor aangegeven behandelingen. Voor een uitgebreidere handleiding, zie de engelstalige gebruiksaanwijzing.

