

Installatie CHECKLIST



Behorende bij de Melag model: **Euroklav 23/29 S/VS**

Met deze checklist geeft u aan dat de benodigde voorzieningen aanwezig zijn zodat uw Melag autoclaaf probleemloos geïnstalleerd kan worden.

Wanneer alle punten akkoord zijn dan zien wij graag het formulier ondertekend retour.

Let op: De deur van de autoclaaf draait naar links open (zie brochure).

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
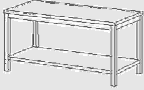
<p>WERKBLAD</p> 	<p>De autoclaaf weegt +/- 50Kg en moet daarom op een stevig werkblad staan. Dit kan een stevige tafel of aanrechtblad zijn van minimaal 60cm diep. Een klaptafeltje of bijzettafeltje voldoet niet! De autoclaaf moet voldoende vrije ruimte om zich heen hebben voor koeling. Wij adviseren u om de autoclaaf altijd op een goede werkhoogte te plaatsen. Laag bij de grond of in een aanrechtkast is niet mogelijk omdat er dan niet voldoende ruimte is om een goede afvoer te maken.</p>	<p>Stevig werkblad, voldoende diep, aanwezig ?</p> <p style="text-align: center;">* JA / NEE</p>
<p>STROOM/ ELEKTRA</p> 	<p>De autoclaaf moet op een geaard stopcontact van een onbelaste stroomgroep geplaatst worden. Bij voorkeur zorgt u ervoor dat er voor de autoclaaf een aparte geaarde stroomgroep gerealiseerd wordt. De autoclaaf kan absoluut niet worden aangesloten op een stroomgroep die reeds behoorlijk belast is. Een stroomgroep waar ook een waterkoker, heteluchtoven, was- of droog-machine op is aangesloten kan dus niet gebruikt worden.</p>	<p>Onbelaste stroomgroep aanwezig ?</p> <p style="text-align: center;">* JA / NEE</p>


Uw paraaf ter bevestiging van dit blad:

Standaard werkt de autoclaaf met interne water tanks die u zelf moet bijvullen en leegmaken.

De autoclaaf kan echter ook op de waterleiding worden aangesloten. Om de autoclaaf op extern water aan te sluiten heeft u een MelaDem40 nodig. Dit apparaat maakt van leidingwater het benodigde demiwater. Leidingwater gaat er in, en het benodigde demiwater komt er uit. Het demiwater gaat direct de autoclaaf in en op die manier zorgt de autoclaaf voor zijn eigen watervoorziening. Ook het verbruikte water wordt dan automatisch in de afvoer geloosd.

Heeft u er voor gekozen dat u de autoclaaf met de interne water tanks gaat gebruiken, dan zijn de onderstaande vragen **niet** van toepassing

Heeft u er voor gekozen om de autoclaaf met een MelaDem op de waterleiding aan te sluiten dan zijn de volgende vragen **wel** van toepassing.

<p>AFVOER</p> 	<p>De autoclaaf moet het verbruikte water automatisch kunnen lozen. Hiervoor is een afvoerpijp met sifon nodig. De afvoerpijp dient direct achter de autoclaaf aanwezig te zijn zodat de afvoerslang van de autoclaaf naar beneden kan aflopen. De afvoerpijp mag niet hoger zitten dan de autoclaaf! Bij voorkeur zit de afvoerpijp onder het werkblad. Boven de afvoer maakt u 1 gat van Ø 3cm in het werkblad. Zorg er voor dat het gat zo ver mogelijk naar achteren in het werkblad zit, zo dicht mogelijk tegen de muur aan.</p>	<p>Vrije afvoer achter de autoclaaf aanwezig?</p> <p>* JA / NEE</p>
<p>WATERKRAAN</p> 	<p>Voor de watertoevoer is een wasmachine kraan nodig. Dat is een standaard beluchte kraan met 3/4 inch uitwendige schroefdraad (standaard wasmachine kraan). De kraan moet in de buurt van de autoclaaf zitten. De kraan mag ook onder het werkblad zitten. Er is dan geen extra gat in het werkblad nodig omdat de slang door het zelfde gat als de afvoerslang kan. De autoclaaf installateur zorgt verder voor de installatie van de MelaDem40 aan de kraan en aan de autoclaaf.</p>	<p>Vrije kraan volgens specificaties aanwezig ?</p> <p>* JA / NEE</p>

Als u nog vragen heeft dan horen wij dat graag van u.

Als alle punten akkoord zijn dan dient u dit formulier (beide pagina's) ter bevestiging te retourneren. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen om de autoclaaf te installeren.

Praktijk naam: Handtekening:


Datum : Naam:

Dit is een achter-aanzicht tekening.


De een situatie tekening **1**: van een autoclaaf in combinatie met de afvoer.

De een situatie tekening **2**: van een autoclaaf in combinatie met de afvoer, meladem40, melajet, keerklep

1: Autoclaaf+afvoer

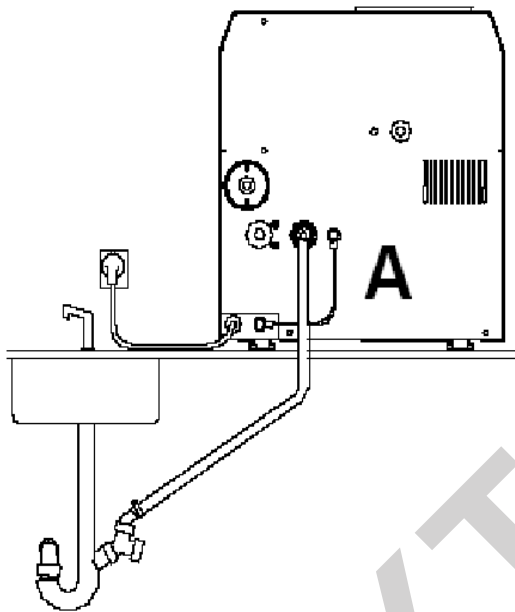

**2: Autoclaaf+afvoer+meladem40
+melajet+keerklep**

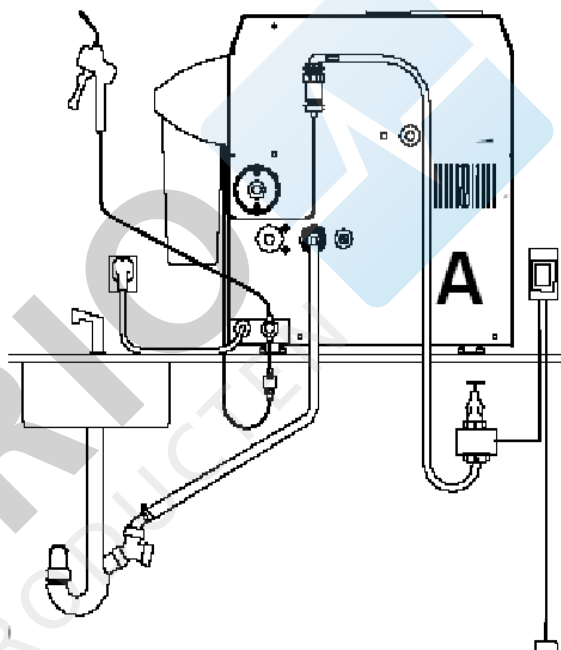

Benodigde ruimte:

Diepte / lengte:

Alle autoclaven hebben minimaal een werkblad nodig van 60cm diep.
Dan steekt de autoclaaf een klein stukje over de rand.

Breedte:

Zonder MelaDem-40 hebben we een breedte nodig van minimaal 62,5cm.
De autoclaaf is 42,5cm breed, en dan hebben we nog 10cm links en rechts nodig voor ventilatie.
Met MelaDem-40 hebben we een breedte nodig van minimaal 72,5cm.
De autoclaaf met MelaDem37 is 52,5cm breed, en dan hebben we nog 10cm links en rechts nodig voor ventilatie.

Hoogte:

We hebben een vrije hoogte boven de autoclaaf nodig. De autoclaaf is 50cm hoog, maar er komt stoom boven uit de autoclaaf en dus kunnen er geen kastjes direct boven hangen.
Als er toch kastjes boven moeten komen te hangen, dan moeten we dit vooraf duidelijk bespreken.

Vragen?

Als de beschikbare ruimte niet minimaal overeenkomt met wat hierboven werd beschreven, neem dan a.u.b. even contact met ons op om dit te bespreken.