

## Onderhoud van een HemoCue Analyzer met een HemoCue Cleaner



1. Controleer of de analyzer is uitgeschakeld. Het display dient leeg te zijn.



2. Trek de cuvettehouder uit naar de laadpositie. Druk met een puntig voorwerp voorzichtig het palletje omlaag dat zich in de rechterbovenhoek van de cuvettehouder bevindt.



3. Houd het palletje ingedrukt en trek voorzichtig de cuvettehouder zoveel mogelijk opzij naar links. Trek voorzichtig de cuvettehouder in de richting waarin het handvat van de cuvettehouder wijst.



4. Reinig de cuvettehouder met alcohol of een mild reinigingsmiddel.



5. Plaats een HemoCue Cleaner in de opening van de cuvettehouder. 5-10 keer op en neer halen, als de cleaner vuil is deze procedure met een nieuwe cleaner herhalen. De analyzer is schoon wanneer de cleaner niet meer vervuild is.

6. Wacht 15 minuten alvorens de analyzer weer te gebruiken. Plaats de cuvettehouder weer terug.



### **Bestelinformatie:**

<i>Art. Nr.</i>	<i>Omschrijving</i>
139001	HemoCue Cleaners (5 stuks)