

Valencia en Silvertex specificatie en schoonmaakadviezen

Valencia en Silvertex

Valencia is een unieke collectie kunststof meubelbekleding van een zeer hoge kwaliteit, die speciaal ontwikkeld is voor projectstoffering.

Het materiaal is waterdicht en niet-luchtdoorlatend waardoor het uitstekend geschikt is voor gebruik in ziekenhuizen, bejaardenhuizen, schepen, vliegtuigen, hotels en andere toepassingen waarbij zware eigen aan het materiaal worden gesteld.

Valencia is voorzien van PermaBlok: een beschermingsvloeistof die is geïmpregneerd in de toplaag van het materiaal.

Eigenschappen

- 100% waterdicht
- Zeer sterk (300.000 toeren Martindale test)
- Bestand tegen lage temperaturen (-23 graden Celsius)
- Anti bacterieel
- Anti schimmel
- Anti vlek behandeling
- Anti statisch
- Gemakkelijk schoon te maken
- Vlam vertragend (EN1021 Part 1 &2)
- Urine bestendig
- Bloed bestendig
- Olie bestendig
- Zweet bestendig
- Speeksel bestendig
- Sulfide bestendig

Reiniging na dagelijks gebruik

Het is erg belangrijk om altijd eerst de bank schoon te maken met overvloedig water en zeep en daarna pas te desinfecteren met een NON-alcohol middel. Bij voorkeur Incidan Foam van Ecolab.

De praktijk leert dat heel veel medici de onderzoeksbanken proberen schoon te maken met een alcohol oplossing of zelfs pure alcohol. Hiermee loopt men de kans dat een eventuele bijtende stof of bloed wat al op het kunstleer zit niet verdund wordt en zal deze mogelijk alsnog een vlek geven.

Algemene schoonmaak adviezen;

- Gebruikt u a.u.b. geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddel!!
- Voor sterke vervuiling raden wij aan een natte doek en zeepwater te gebruiken.
- Voor desinfecteren raden wij een NON-alcoholoplossing aan.
- Gebruik in GEEN GEVAL de handdesinfecteermiddelen
- Wij adviseren Incidan Foam van Ecolab voor het reinigen na gebruik en voor dagelijkse reiniging. (Of een vergelijkbare huismerk van uw leverancier, maar test u dit eerst op een niet zichtbaar deel.)



Hardnekkige vlekverwijdering

Verwijder de meeste vlekken met 1 van de volgende stappen;	
Stap 1	Oogschaduw, mascara, vet, zwarte viltstift, potlood, chocolade, zonnebrand crème en haar of body olie 1)
Stap 2	(rode) lipstift
Stap 3	Bloed, urine, ontlasting, verf op olie basis, teer en asfalt
Stap 4	Alle andere hardnekkige vlekken

Stap 1: Verwijder het overvloedig gemorste met een vochtige doek. Maak schoon met een 1:1 mix van water en Ivory zeep

Stap 2: Gebruik een gewone geconcentreerde alles reiniger. Met een schone doek schoonvegen en schoon spoelen met water, daarna droog maken

Stap 3: Gebruik een mix van ammonia en water in verhouding 1:1, of water en bleekwater in een verhouding 1:4. Schoon spoelen met water, daarna droog maken

Stap 4: Gebruik een mix van isopropyl alcohol en water in een verhouding van 1:1. Bij een hardnekkige vlek gebruik 100% alcohol daarna direct schoon spoelen met overvloedig water en droog deppen.

Extra: voor schoonmaken met stap 4 gebruikt u een zacht katoenen doek doordrenkt met het schoonmaakmiddel en bewerk de vlek in cirkelachtige bewegingen maar niet meer dan 10x. Demp de vlek met een ander doek en bekijk het resultaat.

- 1) Direct schoonmaken wanneer de oppervlakte in aanraking is gekomen met haar en body olie.