

Gebruikershandleiding en onderhoudsvorschriften



INHOUD:

1.	Algemene informatie	2
2.	Speciale waarschuwingen en gebruikers instructies	3
3.	Gebruik	3
4.	Schoonmaak	5
5.	Onderhoud	6
6.	Problemen oplossen	6
7.	Technische gegevens	7
8.	Garantie en voorwaarden	7

1. ALGEMENE INFORMATIE

FABRIKANT

Wesseling Medical Chairs, Venenweg 31, 1161 AK Zwanenburg, Nederland-Tel.+31 204975183 – website: www.medicalchairs.nl

BESCHRIJVING DOEL EN GEBRUIK VAN PRODUCT

De Finn kan voor zeer veel doeleinden gebruikt worden, zoals ziekenhuizen, huisartsen, dierenartsen en tandartsen. Het model is zeer compact zodat de behandelaar dicht bij de patiënt kan komen.

De Finn is een lijn met krukken voorzien van zadel zitting. De zitting is gemaakt van PU of is naadloos gestoffeerd en kan dan in iedere gewenste kleur geleverd worden. De kruk wordt standaard geleverd met een kruis voet van Ø50cm voorzien van vrijlopen wielen met een diameter van Ø50mm. De Finn tabouretten zijn leverbaar in drie verschillende kleuren onderstellen, en met of zonder rugleuning. De bediening van de hoogte geschied door een ringmechanisme of een enkele hevel onder de zitting. Desgewenst is de kruk ook leverbaar met voetbediening. Er zijn drie maten beschikbaar om zo te voldoen aan iedere gebruiker en/of werkomgeving.



OPSLAG

Wanneer het product wordt opgeslagen, moeten de ruimte aan de volgende voorwaarden voldoen:



Luchtvochtigheid 10% / 90% - temperatuur -10 ° C / + 50 ° C

SYMBOLLEN

De verschillende symbolen in deze handleiding en op de apparatuur zelf zijn bedoeld om de aandacht van de gebruiker te vestigen op belangrijke veiligheidswaarschuwingen en nuttige informatie. Houdt u aan alle waarschuwingen en beperkingen en wees bedachtzaam op alle aangekondigde gevaren.

	WAARSCHUWING Waarschuwingberichten worden gebruikt om gebruikers/patiënten te adviseren over elk risico van letsel of gevaar indien de opgegeven procedures en voorwaarden niet zorgvuldig tijdens werking of het onderhoud activiteiten niet in acht worden genomen.
	LET OP Waarschuwing symbolen worden gebruikt om gebruikers te adviseren over gebruik, onderhoud en de toestand van de tafel. Indien deze waarschuwingen niet in acht worden genomen kan dit tot schade leiden aan de apparatuur.

2. SPECIALE WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERS INSTRUCTIES

	Apparatuur mag niet worden gebruikt: <ul style="list-style-type: none">• Zonder de gebruikershandleiding te lezen.• Wanneer de belasting groter is dan de aangegeven capaciteit.• Wanneer de apparatuur niet stabiel genoeg is.• Wanneer er met het oorspronkelijke product is geknoeid en/of aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke configuratie.• Wanneer de besturingselementen en/of onderdelen defect of slechts gedeeltelijk defect zijn.• Wanneer de kruk/optie niet goed is ingesteld of wanneer men denkt dat het schade kan het toebrengen aan een patiënt of een gebruiker.
	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat er geen lichaamsdelen in de buurt komen van bewegende onderdelen en/of besturingselementen.• Schuimrubber en kunststof componenten kunnen branden als ze in contact komen met open vuur.• Bijtende en/of schurende schoonmaakmiddelen kunnen de kappen, doppen en lak beschadigen.• De apparatuur is niet geschikt voor gebruik buitenshuis en/of in oppervlakken die niet vlak genoeg zijn.• UV- en warmte therapie lampen kunnen de bekleding beschadigen.

3. GEBRUIK


OPSTARTEN

Voor het vervoeren van de kruk is deze afgedekt met beschermende middelen die moeten worden verwijderd voor gebruik. Zorg ervoor dat scharen en/of messen niet in direct contact komen met het product. Eventuele beschadiging tijdens het vervoer moet onmiddellijk worden gemeld aan de vervoerder en de leverancier, zonder gebruik te maken van de apparatuur om veiligheidsredenen.

MONTAGE



De kruk wordt geleverd in onderdelen en deze dienen in elkaar geklikt/geschoven te worden alvorens de kruk gebruikt kan worden. Hier voor is geen gereedschap nodig.

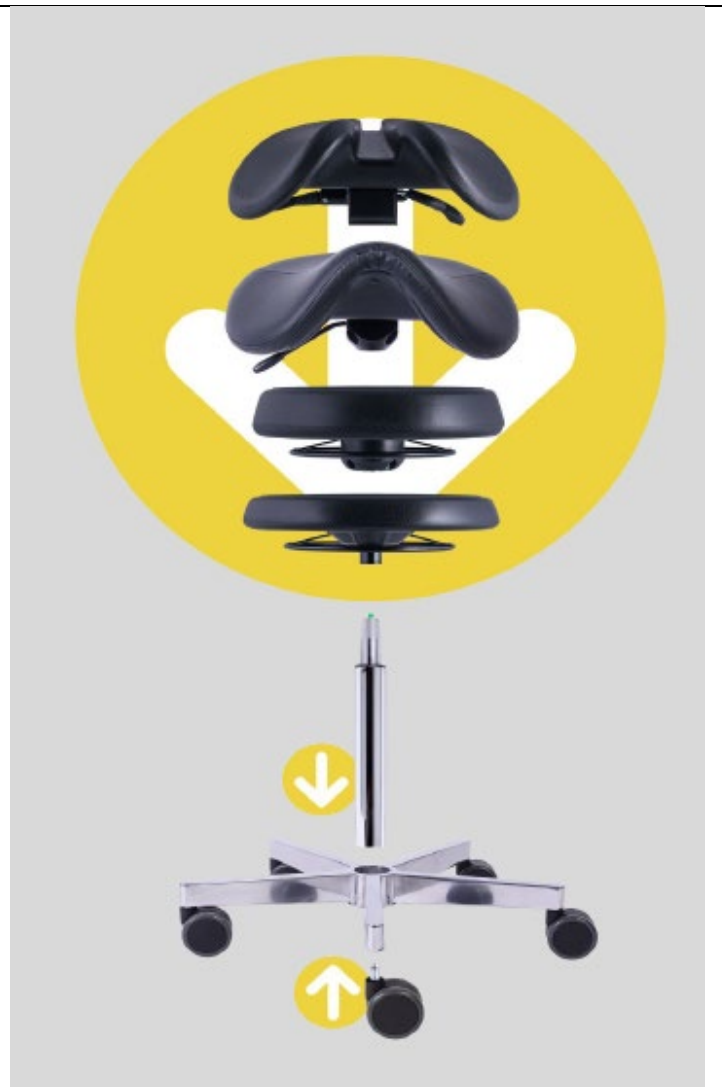
- Monteer de wielen in het onderstel en zet deze op een vlakke ondergrond.
- Plaats de gasveer in het midden van het onderstel.
- Monteer een eventuele stofhoes of voetenring op de gasveer.
- Plaats de zitting op de gasveer



MONTAGE RUGLEUNING

Indien u heeft gekozen voor een kruk met rugsteun, dan kan het zijn dat deze er los bij geleverd wordt. Hieronder wordt beschreven hoe u deze kunt bevestigen/plaatsen.

AANPASSING	BEDIENING	PROCEDURE
		<p>Om de rugsteun te plaatsen moet de stang over de gasveer worden geschoven. Dit moet u doen voordat u de zitting plaatst.</p> <p>Op de gasveer is al een speciale houder geplaatst om ervoor te zorgen dat de rugsteun op de juiste hoogte blijft.</p>

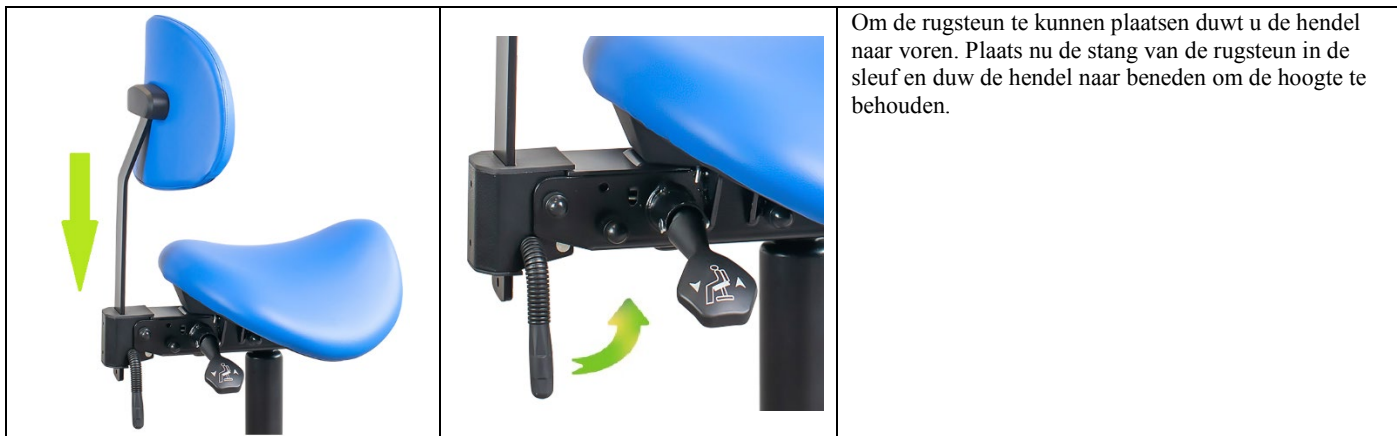

INSTELLINGEN EN AANPASSINGEN

Een kruk is voorzien van een ringbediening of enkele hevel om de hoogte in te stellen, of de optionele voetbediening. Daarnaast kan een kruk zijn voorzien van een in hoogte verstelbare rugleuning. De diverse instelmogelijkheden worden hieronder uitgelegd.

AANPASSING/FUNCTIE	BEDIENING	PROCEDURE
		<p>Voor het aanpassen van de hoogte gebruikt u de ring. Knijp de bediening in en beweeg mee in de gewenste richting. Laat de ring los als de gewenste positie is bereikt. Het ringmechaniek bevindt zich onder de zitting van de kruk.</p> <div data-bbox="949 958 1481 1025" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>! WAARSCHUWING !</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Als het gewicht van de gebruiker op de zitting rust, activeert u de gasveerhendel alleen indien u zeker weet dat het gehele gewicht wordt ondersteund. • Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren.
		<p>Voor het aanpassen van de hoogte of de zithoek gebruikt u de juiste hendel. Knijp de bediening in en beweeg mee in de gewenste richting. Laat de hendel los als de gewenste positie is bereikt. De hendels bevinden zich onder de zitting van de kruk.</p> <div data-bbox="949 1395 1481 1462" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>! WAARSCHUWING !</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Als het gewicht van de gebruiker op de zitting rust, activeert u de gasveerhendel alleen indien u zeker weet dat het gehele gewicht wordt ondersteund. • Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren.
		<p>Indien de kruk is voorzien van een voetbediening duwt u op de ring en beweegt u mee in de gewenste richting. Haal uw voet van de ring als de gewenste positie is bereikt.</p> <div data-bbox="949 1776 1481 1843" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>! WAARSCHUWING !</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Als het gewicht van de gebruiker op de zitting rust, activeert u de gasveerhendel alleen indien u zeker weet dat het gehele gewicht wordt ondersteund. • Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren.

		<p>Rugstang 3D:</p> <p>Trek de hendel naar boven en beweeg de leuning in de gewenste richting en laat de hendel los als de juiste hoogte/diepte is bereikt.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  WAARSCHUWING  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren.
		<p>Draaibare rug- / lendesteun:</p> <p>Draai de knop los en breng de leuning naar de gewenste hoogte. Draai de knop weer vast om deze hoogte te behouden. De steun is op diverse posities te bevestigen. Door de 4 schroeven los te maken aan de onderzijde van de leuning, kunt u zelf deze positie aanpassen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  WAARSCHUWING  </div> <ul style="list-style-type: none"> • Het instellen van de verstelbare secties kan knellingen veroorzaken in de buurt van de scharnieren.

4. SCHOONMAAK

Om de bekleding een langere levensduur te geven dient de tafel regelmatig schoon gemaakt te worden. Bij het schoonmaken wordt er onderscheid gemaakt tussen kunstleer op basis van PVC (met weekmakers) en PU.

PVC kunstleer: gebruik een doek of een zachte borstel met water en een neutraal reinigingsmiddel voor het reinigen. Vlekken op de bekleding moeten onmiddellijk worden verwijderd met kleurloze ethylalcohol verdund in 20% water. Goed naspoeien en drogen.

PU kunstleer: gebruik een doek of een zachte borstel met een reinigingsmiddel verdund tot 70% in water voor het reinigen. Goed naspoeien en drogen.

Kijk voor een uitgebreide lijst met schoonmaak middelen op www.medicalchairs.com



WAARSCHUWING



- AGRRESSIEVE REINIGSMIDDELEN KUNNEN SCHADE TOEBRENGEN AAN DE OPPERVLAKKEN.
- GEBRUIK GEEN STOOM JETS, WASTUNNELS, OF HOGEDRUK REINIGERS

5. ONDERHOUD

Onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door technici die vertrouwd zijn met de inhoud van deze gebruiksaanwijzing. Controleer altijd of de apparatuur veilig is na "ruwe behandeling" (bijvoorbeeld val, hobbels, enz.) en elk moment dat u twijfelt over de veiligheid.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Preventief onderhoud moet worden uitgevoerd met de frequentie die in de tabel is aangegeven.

FREQUENTIE	PROCEDURE
Ten minste eenmaal per jaar	Algemene schoonmaak apparatuur.
	Visuele en functionele inspectie van de uitrusting en verwante hydraulische en handmatige besturingselementen.
	Frame en mechanische onderdelen: Controleer of schroeven en bouten vast zitten; aanwezigheid van scheuren en vervormingen of schade.
	Gasveer mag alleen olie vertonen in de vorm van smeerolie op de zuigerstang. Overtollige olie kan duiden op lekkage.
	Controleer of de verstelbare secties stabiel zijn en niet meegeven wanneer de bedieningshendels niet worden bediend.
	Wielen: De rollen moeten soepel lopen en loopvlakken moet vrij zijn van eventuele belemmeringen, vuil of schade. De kruk moet stabiel zijn als deze op alle wielen staat

CORRECTIEF ONDERHOUD

Om veiligheidsredenen en om te voorkomen dat de garantie ongeldig wordt verklaart, kan geen onderdeel worden geopend of behandeld voor reparatie.



WAARSCHUWING



- EVENUTELE GEBREKEN, SCHADES EN ONDERHOUDSBEURTEN DIE BELANGRIJK ZIJN VOOR DE VEILIGHEID MOETEN WORDEN GEREgistREED IN HET BIJGESLOTEN FORMULIER.

RESERVEONDERDELEN

Gebruik alleen originele reserveonderdelen van Wesseling Medical Chairs. Neem contact op met Wesseling Medical Chairs voor de onderdelen die u wellicht nodig heeft.

6. PROBLEMEN OPLOSSEN

DIRECTE E-MAIL VOOR TECHNISCHE- OF GEBRUIKERS ONDERSTEUNING:

info@medicalchairs.nl

Als u liever met een van ons wilt spreken via de telefoon kunt u bellen op: +31(0)20 497 5183

Let op:

- Voordat u contact opneemt voor service of ondersteuning, dient u het "serienummer" te noteren. Dit nummer vindt u in het productlabel gekoppeld aan de apparatuur. Dit zal de dienstverlening versnellen en verbeteren.

De apparatuur werd getest naar aanleiding van zeer strenge voorwaarden. Tijdens de test zijn geen specifieke breuken of fouten opgetreden. Indien de apparatuur niet werkt, volg dan onderstaande probleemoplossingsproces.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Instellen van de hoogte werkt niet of positie kan niet worden behouden.	Gasveer defect of onjuist afgesteld	Neem contact op met Wesseling BV
	Gasveerbediening defect	
Kruk is slecht te verplaatsen	Wiel(en) beschadigd	Controleer het loopvlak van de wielen op eventuele schade of vuil
	Verkeerde wielen geleverd/besteld	Verplaats de kruk eerst terwijl u zit, en vervolgens als u staat. Als u verschil merkt dan kan het zijn dat er (on)belast geremde wielen zijn besteld.
Instellen van de hoogte van de rugleuning werkt niet of positie kan niet worden behouden.	Hendel beschadigd	Controleer of de knevel beschadigd is.

7. TECHNISCHE GEGEVENS

Product naam	FINN			
Product code	ACL****/BBL****	ACM****/BBM****	ACH****/BBH****	Met rugleuning
Hoogte verstelling	42 – 56cm	49 – 69cm	56 – 81cm	Hoogte + 3cm
Werkhoogte	72 – 86cm	79 – 99cm	86 – 111cm	Hoogte + 3cm
Maximale belasting	150kg			
Verstelsysteem	Gasveer voorzien van stofhoes			
Verstellen van gasveren	Hevel, ringmechaniek of voetbediening			
Wielen	Zachte vrijlopende wielen Ø50mm, optioneel Ø 65mm			
Gewicht product	± 12 - 22kg			
Afmetingen zitting	425x350mm			
Dikte zitting	60mm			
Afmetingen rugleuning	340 x 260mm (hoog) / 354x100mm (laag) / 430 x 120mm (draaibare lendesteun)			
Afwerking	PU Zitting of zitting naadloos gestoffeerd, optionele PU rugleuning of rugleuning voorzien van rits aan onderzijde			
Materiaal	PU Zwart, Fresh, Purfect of Stamskin TOP			

8. GARANTIE EN VOORWAARDEN

ALGEMENE AFTER-SALES SERVICE VOORWAARDEN VOOR WESSELING MEDICAL CHAIRS-ITEMS

De garantie heeft een geldigheid van 24 maanden vanaf de datum van levering.

De garantie dekt geen verbruiksgoederen, oplaadbare batterijen en over het algemeen al het materiaal onderworpen aan slijtage, storingen veroorzaakt door stoten, waterschade, misbruik of onjuist gebruik, toevallige gebeurtenissen en transportschade. De garantie zal automatisch ongeldig worden gemaakt als er met de apparatuur is geknoeid.

Reparatie van de apparatuur zal worden uitgevoerd specialisten en moet worden gemeld aan de verdeler.

Schatting moet specifiek worden aangevraagd.

Betaling is vooraf, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Voor elk geschil bedraagt de enige bevoegde gerecht de rechtbank te Amsterdam

REPARATIES BINNEN DE GARANTIE

Reparaties buiten de garantie moeten uitdrukkelijk worden aangevraagd.

Herstelwerkzaamheden onder garantie zal worden uitgevoerd in onze werkplaats en van de vergunning

De retourverzending voor producten die worden verzonden in hun originele verpakking zullen kosteloos worden gemaakt.

Een fiscaal document (factuur van de verkoop, factuur of contanten aankoop bon) is vereist voor een garantieclaim; de aankoopdatum aangegeven op de bon bepaalt of de claim binnen de garantie periode is of niet.

Indien bij inspectie, het product volledig blijkt te functioneren, worden de uitgaven alsnog in rekening gebracht aan de cliënt.

REPARATIES BUITEN DE GARANTIE

Voor reparaties buiten de garantie uitgevoerd in de fabriek, wordt transportkosten doorberekend aan de klant.

De garantie op de onderdelen die worden vervangen tijdens de herstelwerkzaamheden is 12 maanden vanaf het moment dat de apparatuur wordt geplaatst.

Indien bij inspectie, het product volledig blijkt te functioneren, worden de uitgaven alsnog in rekening gebracht aan de cliënt.

REPARATIES THUIS GEMAAKT

In het geval dat reparaties moeten worden gemaakt bij de klant thuis, is een schriftelijk verzoek nodig met daarin de gegevens van de monteur, de gegevens van het product en details van het defect.

De kosten per kilometer en arbeidsloon van de technicus die op locatie komt zal van te voren worden overeengekomen met de klant.

Tijd en kilometers worden berekend vanaf het moment dat de technicus onze werkplaats verlaat totdat hij/zij terugkeert.

VERKOOP VAN RESERVEONDERDELEN EN VERBRUIKSGOEDEREN

Orders moeten schriftelijk worden door gegeven met daarin het item, de verzendwijze en de gegevens van de klant.

De volgorde van verwerkingstijd kan variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal.

Reserve onderdelen kunnen niet worden geretourneerd.